

Izolacja alginowa PremEco® Line



Specjalny środek izolacyjny do połączenia gipsu z tworzywem sztucznym protezy przy obróbce polimerów polimeryzujących na gorąco i na zimno. Dzięki swej optymalnej konsystencji może być łatwo наносzony, dobrze wnika w gips i doskonale izoluje.

pl Instrukcja użycia, dokładnie przeczytać!

Zakres stosowania

Izolacja dla wszystkich wykończeń, podścielania, napraw i rozszerzeń częściowych i całkowitych protez z tworzywa sztucznego, protez szkieletowych, ruchomych protez kombinowanych, natychmiastowych i tymczasowych protez z tworzywa sztucznego.

Skład

Izolacja alginowa PremEco® Line jest to wolna od formaldehydów mieszanka wody, alginianów i środków konserwujących.

Dozowanie i sposób stosowania

- Modele i ściany przednie oczyścić z pozostałości wosku, środków antyadhezyjnych lub tłuszczu i dokładnie namoczyć w wodzie.
- Powierzchnię gipsu pozostawić na chwilę do obeschnięcia.
- Modele po sparzeniu ochłodzić na tyle, aby para wodna już się nie wydzielala.
- Do naczynia wlać potrzebną ilość środka izolującego.
- Izolację alginową nanieść jedno- lub dwukrotnie przy pomocy czystego i miękkiego pędzla.
- Pędzla nigdy nie zanurzać bezpośrednio w butelce z izolacją alginową.
- Resztek nie wlewać z powrotem do butelki, aby nie doszło do skażenia materiału.
- Pędzel po użyciu umyć pod bieżącą wodą.
- Nie zwilżać klamer, części protezy i zębów.
- Unikać nadmiaru w rowkach, bruzdach i zakładkach.
- Zaizolowany model ostrożnie opłukać pod bieżącą wodą.
- Dobrą izolację cechuje równomierny połysk powierzchni.

Izolacja alginowa PremEco® Line jest produktem wytworzonym w systemie PremEco® Line

Więcej informacji w Internecie na stronie www.merz-dental.de.

Wskazówki specjalne

- Pojemnik na izolację alginową PremEco® Line po użyciu starannie zamykać, aby nie dochodziło do wysuszenia.
- Przechowywać w suchym miejscu i w temperaturze pokojowej, unikać bezpośredniego nasłonecznienia.
- Materiału po upływie terminu przydatności do użycia nie używać.
- Nr partii podawać przy każdym procesie, który wymaga identyfikacji materiału.

Właściwości produktu opierają się na przestrzeganiu i postępowaniu zgodnie z niniejszą instrukcją użycia.

Data sporządzenia informacji 2013-05