


Prothetik Color System

PremEco® Line

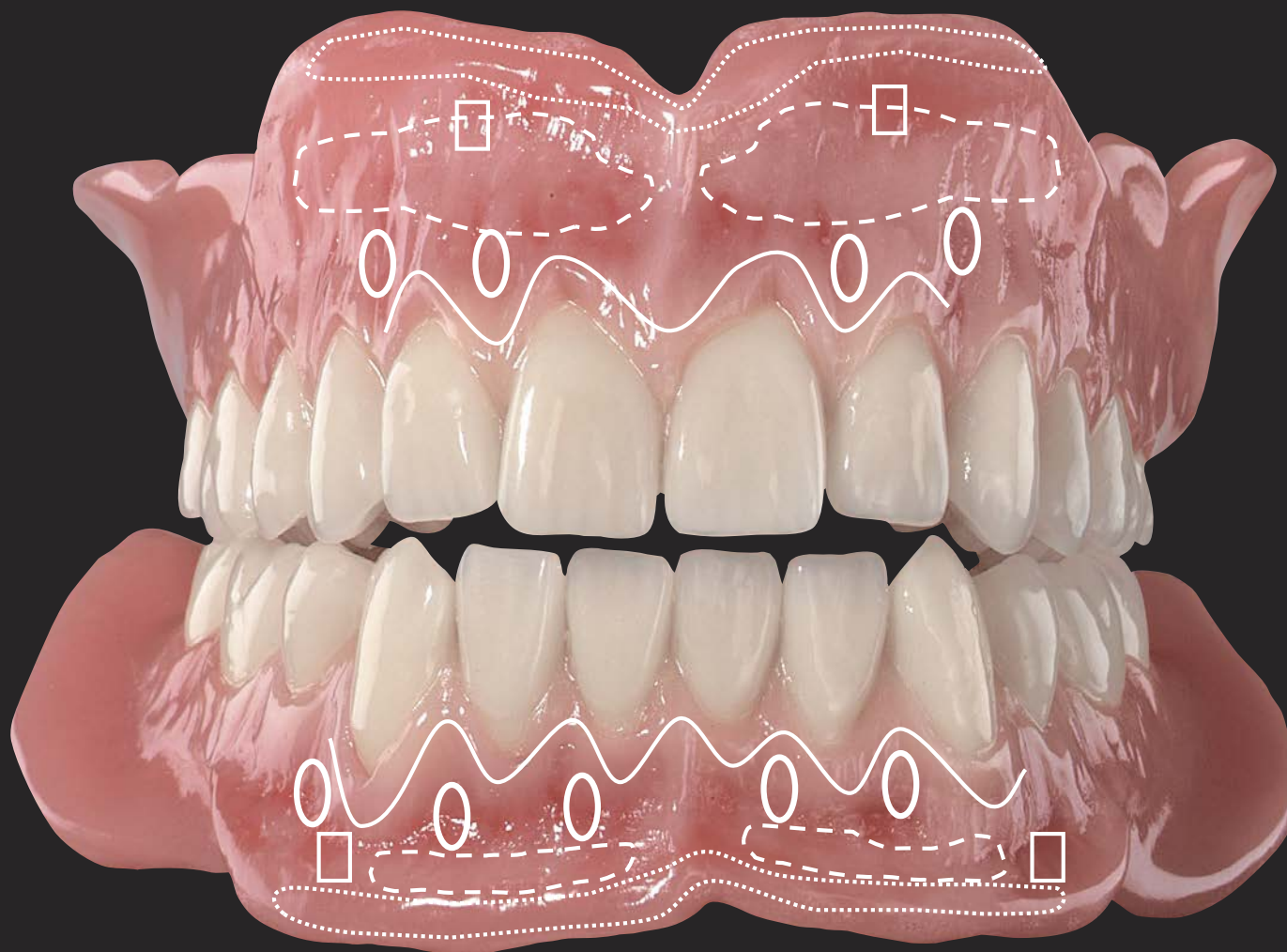

- | | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  Anemone |  Koralle |  Muschel |  Anemone & Saphir |  Koralle & Rubin |
|  anemone |  coral |  shell |  anemone with sapphire |  coral with ruby |

Step by Step



PremEco® Line

KUNSTSTOFF
GIESSYSTEM



Qualität
made in Germany



STEP BY STEP

PremEco® Line GIESSYSTEM

PremEco® Line GIESSYSTEM aus monomeresstem Material mit Zubehör

Zirkuläre Markierung bis zur Hälfte des Funktionsendes anbringen

Wachsmoldform bis zur Markierung am Gegenmodell an-schweißen. Dieser Überschuss wird als Kontraktions-

STEP BY STEP

PremEco® Line GIESSYSTEM

Modelle auf die Trichter ausrichten, Kuvettengieß aufsetzen. Die Schraubkappen ansetzen den Ring exakt im Kuvett-vertiefen

Die Trichterform entfernen. Schrauben vollständig lösen und den Kuvettboden abheben. Gel am Modellrand unter 45° Winkel zum einfachen spülen entfernen abschneiden

STEP BY STEP

PremEco® Line GIESSYSTEM

Modelle nochmals 10 min in klarem, kaltem Wasser legen

Aggregatbildung direkt aus der Flasche auf das Modell geben und mit weichen Pinsel eine Schichtbildung ca. 30 min einwirken lassen. Isolierblechschicht unter fließendem Wasser abspülen. Abschließend die Ober-Beide vorsichtig abspülen, um Pölchen zu entfernen

Kuvette bis zur Hälfte für 4 stellen, um eine gute 6-erische (Trichterbildung) Erzeugung keine Vibration lassen

Kuvette mit dem PremEco® Line Kuvettbecher anlegen. Den Luftschlauch zu verbinden, legen die Einstell-merkmale der Kuvette weit davor

Bei der Gießtechnik mit Gel sollte abgepumpt werden. Durch den hohen Wassergehalt des Gels kommt es sonst zu einem Schmelzen der Gelform. Eine Oberflächenab-tupfung des Gels ist normal. Die Oberfläche kann mit weichen Kuvettbecher gestrichelt werden, um eine optimale Kuvett-oberfläche zu erhalten. Die Feuchtigkeit der Trichterform sollte mit einem Handtuch abgetrocknet werden, um eine sichere Fixierung der Zähne zu gewährleisten. Bei Verdrängungen im Arbeitsaufbau sollte die Form in einem geschlossenen Behälter mit feuchten Tüchern aufbewahrt werden

STEP BY STEP

PremEco® Line GIESSYSTEM

Retentionen mit einem großen Fassendrehen anlegen. Anpassen der Benutzflächen kann mit Schmelzgeräten oder dem Sandstrahlverfahren erfolgen. Retentionen sind nicht einseitig

Tipp: Sollen die Zähne mit AGS abgedruckt werden, kann vor dem Gießen eine Schicht-ebene angebracht werden. Die Zähne zum Ansetzen in die Kuvette setzen, so werden sie Zahnfleisch gedrückt, da mit dem Basiskunststoff in Verbindung treten. Zähne mit einer Pinzette in die Kuvette-Form zurückdrücken. Sollen Facetten, Kanten oder Zähne nicht ausfallen, muss in der Form fassen, kann diese mit einem wenig feuchtbefüllten Behälter werden

Isoliertes Modell in die Gelform zurücksetzen und die Schrauben Kuvettengießplatte auflösen und ver-schrauben

Tipp: Modelle mit Haftflächen können beim Auflösen des Bodensatz mit Magneten eine Trennungslösung erfahren. Eine Boden-lösung wird separat an die Flasche. Der Magnet wird bei Bedarf zur Trennung eingesetzt und ansetzen während Kuvettbecher, „Zentrier“ verschoben, die Kuvette der Boden-plate gelassen der Kuvette einen sicheren Stand

Monomer sollte kühl gelagert und stets bei gleich-bleibender Temperatur verarbeitet werden, um eine lange Frischzeit zu gewährleisten. Mit dem Dosisverhältnis wird das exakte Mischungsverhältnis erreicht. Das Pulver darf nicht durch Nadeln komprimiert werden



REF 1090298



REF 1090340



REF 1090341



REF 1090343



REF 1090342



REF 1090346



REF 1090344



REF 1090325



REF 1090345